



Abbott Laboratórios do Brasil Ltda

Rua Michigan, 735

São Paulo, Brasil

CEP: 04566-905

T: (11) 5536-7000

F: (11) 5536-7345

## **INSTRUÇÕES DE USO**

### **Hyalufem®**

#### **Gel Hidratante Intravaginal**

ácido hialurônico

Gel hidratante intravaginal formulado com componentes de origem natural.

Hidratante e restaurador da umidade vaginal natural de longa duração

#### **Apresentação:**

Bisnaga contendo 24 g e 8 aplicadores de uso único.

USO TÓPICO VAGINAL

#### **USO ADULTO**

#### **Composição:**

ácido hialurônico..... 5 mg/dose

(água, goma xantana, carragena, propanediol, caprilato de sorbitano, hialuronato de sódio, ácido benzoico, ácido láctico, hidróxido de sódio).

Aplicador com corpo em polietileno e êmbolo em polipropileno, com limitador.

## **INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

### **COMO HYALUFEM® FUNCIONA?**

Hyalufem® é um gel hidratante intravaginal de longa duração, não hormonal, livre de parabenos e livre de derivados de petróleo, desenvolvido para hidratar, além de restaurar a umidade vaginal natural. Hyalufem® contém ácido hialurônico que atua diretamente na região desidratada proporcionando umidade e lubrificação.

Após a inserção do gel na vagina, o ácido hialurônico adere à parede vaginal, criando uma superfície hidratada. As propriedades de hidratação do gel são atribuídas às características do ácido hialurônico que libera as moléculas de água no tecido, aliviando assim o estado seco da vagina, sem irritar a mucosa. O ácido hialurônico permanece aderido até a descamação das células epiteliais, o que ocorre em até 3 dias. Durante esse período, ocorre a migração de água e eletrólitos para a vasculatura dérmica causando vasodilatação, o que aumenta o suprimento sanguíneo à mucosa vaginal e subsequentemente melhora, ainda mais, a hidratação tecidual da região.

### **QUEM PODE UTILIZAR HYALUFEM®?**

Hyalufem® foi desenvolvido para as mulheres que sofrem de ressecamento vaginal.

O ressecamento vaginal ocorre quando a mucosa não mantém hidratação suficiente para o conforto íntimo, podendo causar coceira, infecção bacteriana ou fúngica e relações sexuais dolorosas. Esta condição pode ocorrer após o parto, durante tratamentos com quimioterapias, períodos de estresse e, principalmente, na menopausa.



Abbott Laboratórios do Brasil Ltda

Rua Michigan, 735

São Paulo, Brasil

CEP: 04566-905

T: (11) 5536-7000

F: (11) 5536-7345

### **QUAIS AS VANTAGENS DO USO DE HYALUFEM®?**

Hyalufem® é um gel hidratante intravaginal.

Hyalufem® não contém hormônios.

Hyalufem® é livre de parabenos que podem causar alergias e irritações.

Hyalufem® é livre de derivados do petróleo que podem dissolver preservativos e diafragmas.

Hyalufem® permite que a relação sexual seja mais confortável, restaurando a umidade vaginal.

Hyalufem® alivia os sintomas do ressecamento vaginal como: coceira, irritação e desconforto na relação sexual, ajudando a manter a umidade e a saúde vaginal.

Hyalufem® é ginecologicamente testado.

### **POR QUANTO TEMPO DEVE-SE UTILIZAR HYALUFEM®?**

Dependendo da causa, a duração do ressecamento vaginal pode variar. Em caso de dúvida, converse com o seu médico.

### **HYALUFEM® PODE SER UTILIZADO ANTES DA RELAÇÃO SEXUAL?**

Sim. Porém, utilizando Hyalufem® regularmente, não haverá a necessidade da aplicação para a prática sexual, pois a vagina estará hidratada.

### **HYALUFEM® CAUSA CORRIMENTO?**

Devido às suas propriedades mucoadesivas, Hyalufem® tem uma probabilidade muito pequena de escorrer ou causar corrimento.

Se ocorrer um pouco de secreção é apenas uma combinação de Hyalufem® e de possíveis células mortas. Geralmente, quanto maior a secreção vaginal inicial, maior é o número de células mortas que serão expelidas nas fases iniciais de uso. Isso melhorará com a continuidade das aplicações e, eventualmente, desaparecerá à medida que a umidade vaginal for recuperada. Se a secreção vaginal apresentar qualquer odor desagradável ou coloração diferente, pode ser evidência de uma infecção vaginal preexistente. Consulte seu médico para mais esclarecimentos.

### **QUAIS AS PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS PARA UTILIZAÇÃO DE HYALUFEM®?**

- Hyalufem® é somente para uso vaginal.
- Utilizar sob supervisão médica.
- A utilização do Hyalufem® com outros cremes vaginais deve ser orientada pelo seu médico.
- Não existem interações conhecidas com outros produtos / medicamentos.
- Não é recomendado o uso durante o período menstrual.
- Em caso de irritação suspenda o uso e se persistirem os sintomas consulte o médico.
- Pode ocorrer sensação de ardência, especialmente logo após a aplicação, que tende a desaparecer. Recomenda-se observar a progressão e, caso persista, descontinuar o uso e procurar o seu médico.
- Não utilizar após a data de vencimento indicada na embalagem e caso a embalagem esteja violada.

### **QUANDO NÃO DEVO USAR HYALUFEM®?**


Este produto é contraindicado em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula. **Informe ao seu médico ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do produto. Informe também a empresa através do seu Serviço de Atendimento ao Consumidor.**

### **COMO DEVO USAR HYALUFEM®?**

[WWW.ABBOTTBRASIL.COM.BR](http://WWW.ABBOTTBRASIL.COM.BR)

### Instruções de uso:

1. Separe um aplicador, destrave-o puxando o êmbolo até o limite estipulado, conforme figura 1. Retire a tampa da bisnaga.
2. Encaixe o aplicador no bico da bisnaga rosqueando-o lentamente, conforme figura 2.
3. Aperte a base da bisnaga com os dedos, forçando a entrada do gel no aplicador.
4. Preencha o aplicador com o gel até o limite recomendado conforme figura 3.
5. Retire o aplicador desrosqueando-o, enquanto segura a bisnaga. Feche-a novamente.
6. Introduza profundamente o aplicador que contém o produto na vagina, preferencialmente na posição deitada, elevando-se as pernas, conforme figura 4.
7. Transfira todo o conteúdo do aplicador para a vagina.
8. Após usar o aplicador, deve-se descartá-lo.

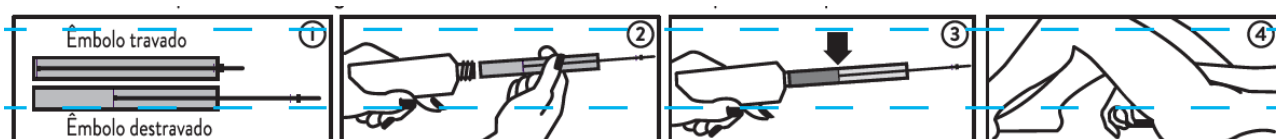

### COMO SEI QUE ESTOU UTILIZANDO A QUANTIDADE CORRETA?

É recomendada uma única aplicação a cada 3 dias. Ou conforme orientação médica.

O aplicador descartável de Hyalufem® possui um mecanismo que fornece a quantidade indicada para cada aplicação, 3 g de gel.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este produto, procure orientação do farmacêutico ou a empresa através do seu Serviço de Atendimento ao Consumidor.**

### ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR HYALUFEM®?

#### Cuidados de conservação:

Manter em temperatura ambiente (15 a 30°). Proteger da luz e da umidade.

Mantenha fora do alcance de crianças.

#### Prazo de validade

**Número do lote, data de fabricação e prazo de validade – Vide cartucho.** Após aberto, válido por 60 dias.

#### Características

Gel semitransparente levemente branco, opaco, com odor característico.

Não é tóxico se ingerido. Não tem gosto.

**Antes de usar, observe o aspecto do produto. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico ou a empresa através do seu Serviço de Atendimento ao Consumidor para saber se poderá utilizá-lo.**

#### Descarte:

Após o uso, descartar a embalagem vazia em local apropriado.

Notificação ANVISA: 80870530001



Abbott Laboratórios do Brasil Ltda

Rua Michigan, 735

São Paulo, Brasil

CEP: 04566-905

T: (11) 5536-7000

F: (11) 5536-7345

Farmacêutica Responsável: Gislaïne B. Gutierrez  
CRF-PR: nº 12.423

**Notificado e Fabricado por:**  
**HERBARIUM LABORATÓRIO BOTÂNICO LTDA**  
Av. Santos Dumont, 1100 - Colombo-PR  
CNPJ: 78.950.011/0001-20  
INDÚSTRIA BRASILEIRA

**ou**

**Fabricado por: HELIANTO FARMACÊUTICA LTDA**  
Av. José Abbas Casseb, 135 - São José Do Rio Preto - SP  
CNPJ 04.506.487/0001-30  
INDÚSTRIA BRASILEIRA

**Comercializado e distribuído por:**  
**Abbott Laboratórios do Brasil Ltda**  
Rua Michigan, 735 - São Paulo - SP  
CNPJ 56.998.701/0001-16

Hyalufem® é uma marca registrada pelo Herbarium Laboratório Botânico.

**ABBOTT CENTER**  
Central de Relacionamento com o Cliente  
**0800 703 1050**  
**[www.abbottbrasil.com.br](http://www.abbottbrasil.com.br)**



Reciclável

**Logo Abbott**

FO 02